

# Programat<sup>®</sup>

## Anleitung für Softwareupdate via USB-Stick:

### Unterstützte Geräte:

Programat P 500\* & P500/G2  
Programat P 700 & P700/G2  
Programat EP 5000 & EP 5000/G2

### Herzliche Gratulation:

Sie haben sich dazu entschieden, ein Software-Update mittels USB Stick durchzuführen. Die nachfolgende Anleitung informiert Sie, wie Sie diese einfache Anwendung durchführen können.

### Vorgehensweise:

Sollten Sie die neueste Software noch nicht auf einem USB Stick erhalten haben, öffnen Sie am besten im Internet die Ivoclar Vivadent Homepage. Die aktuelle Software für Ihren Programat finden Sie unter [www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter](http://www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter). Im Kapitel: „Programat Software Updates (für USB-Stick)“ können Sie die für Ihr Gerät notwendige Software auswählen und auf USB-Stick speichern.

### Gehen Sie nun wie folgt vor:

1. Beim Dateidownload-Dialog "Öffnen" wählen und warten bis der Ordner (z.B. P700\_V1[1].03.zip) geöffnet wurde
2. Anschliessend die darin befindliche \*.gz-Datei (z.B. P700\_V1.03.gz) markieren und auf Ihren USB Stick kopieren

### WICHTIG!

Die Software-Version auf dem USB-Memory-Stick muss aktueller (höher) sein als die auf dem Gerät befindliche Software-Version. Wenn Sie nicht sicher sind welche Software Version Ihr Gerät hat können Sie diese im Gerät unter dem Menü „Informationen“ nachlesen.

3. USB Memory Stick mit aktueller Software-Version am Gerät anschliessen
4. Menüpunkt für Software-Update aufrufen (via Menü Einstellungen, Seite 2)
5. Entsprechende Software-Datei auswählen (z.B. P700\_V1.03.gz)
6. Mit dem Touch-Button "Öffnen" den Software-Update Prozess beginnen
7. Abwarten bis das Gerät ein erfolgreiches Software-Update meldet
8. Gerät neu starten

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



### Wichtige Information:

Bitte beachten Sie, dass abhängig von der installierten Software Version alle Brenn- und Pressprogramme (Ivoclar Vivadent- und individuelle Programme) beim Update auf Werkseinstellung zurückgestellt werden. Daher empfehlen wir alle individuellen Einstellungen von Programmen vorher zu notieren oder auf USB-Stick oder PC (via PrograBase 2 Software) zur speichern.

\*) **Besonderheit beim Programat P500:** ein Software-Update ist beim Programat P500 erst möglich, wenn zu einem früheren Zeitpunkt die Software-Version V3.0 auf die konventionelle Art auf das Gerät aufgespielt wurde!