

PrograBase 3

Die multifunktionelle Software für Ihren Programat®-Ofen

Unterstützte Geräte	Betriebssysteme	Systemvoraussetzungen
Programat P 300 & 300/G2 Programat P 500 & P500/G2 Programat P 700 & P700/G2 Programat EP 3000 & EP 3000/G2 Programat EP 5000 & EP 5000/G2 Programat CS Programat S1 Programat S1 1600	Windows XP (inkl. Microsoft .NET Framework 2.0* und Service-pack 2) Windows Vista Windows 7 Windows 8	Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Farben mind. 256 RAM mind. 256MB CPU: 1 GHz Mind. 11 MB freier Speicher Internetanschluss

Installation

Nach dem Einlegen der CD in das Laufwerk startet die Installation automatisch. Zum Durchführen folgen Sie bitte den Anweisungen des Installationsassistenten.

PrograBase 3 kann auch ohne angeschlossenem Brennofen verwendet werden. Zur Datenübertragung und zur virtuellen Bedienung verbinden Sie bitte den Brennofen mit ihrem Computer (USB-Downloadkabel im Lieferumfang des Ofens enthalten).

Programmstart


Starten Sie PrograBase 3 nach Abschluss der Installation über das Startmenü Ihres Computers

Wählen sie einen Brennofen

Virtuelle Fernbedienung

Programminformationen

Navigationsleiste zur Funktionsauswahl

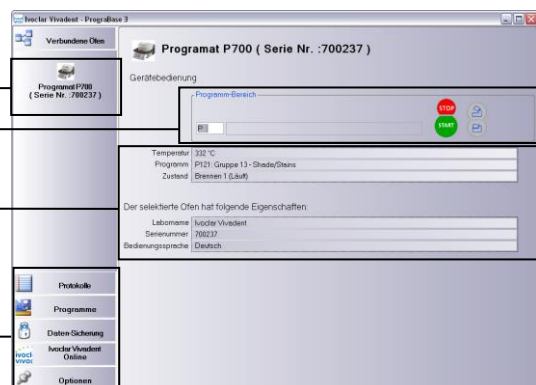


Einstellungen

Unter dem Button „Optionen“ werden die Programmeinstellungen definiert

Wählen Sie zwischen den Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Portugiesisch oder Italienisch


Einstellen der gewünschten Temperatur
Masseinheit (Celsius oder Fahrenheit)

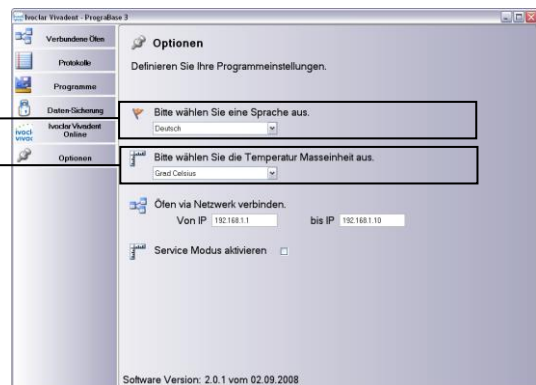

*) Wenn Microsoft .NET Framework 2.0 auf Ihrem Computer nicht vorhanden ist, wird dies bei der Installation auf Ihrem Computer mitinstalliert. Benötigter Speicherplatz ca. 300 MB.


Funktionsbereich „Protokolle“

Laden, Editieren und Verwalten von Brennprotokollen

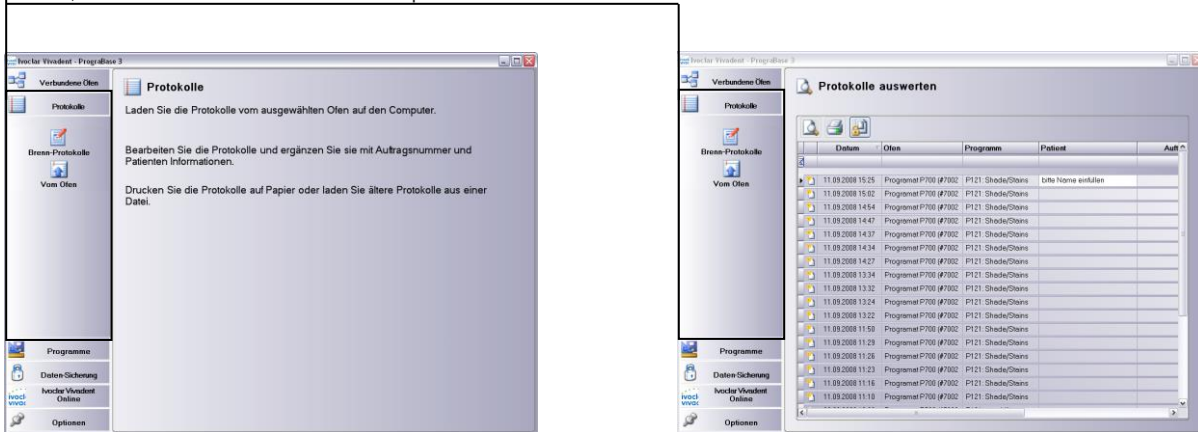

Funktionsbereich „Programme“

Laden, Editieren und Verwalten von Brennprogrammen

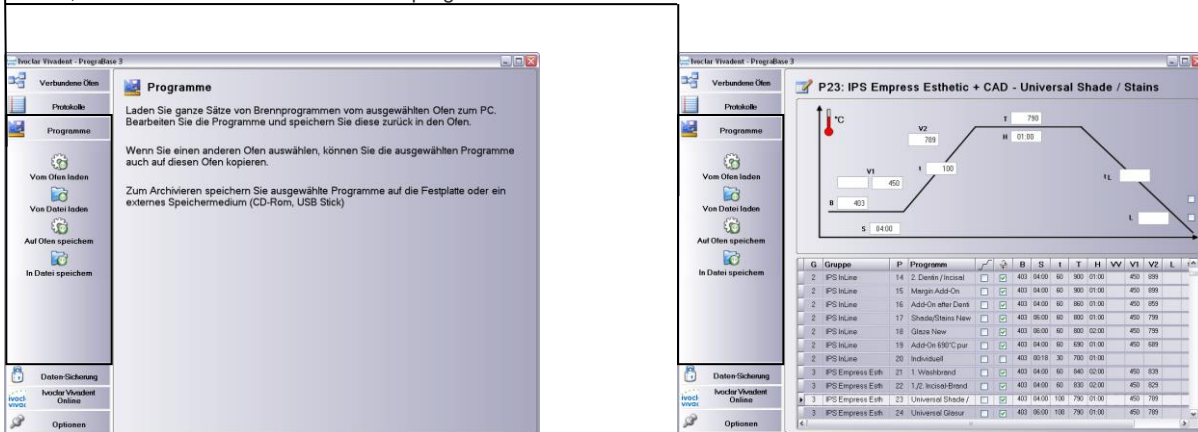


Funktionsbereich „Datensicherung“

Speichern aller Programmparameter per Mausklick



Funktionsbereich „Ivoclar Vivadent Online“

Verbindung mit der Herstellerseite per Mausklick

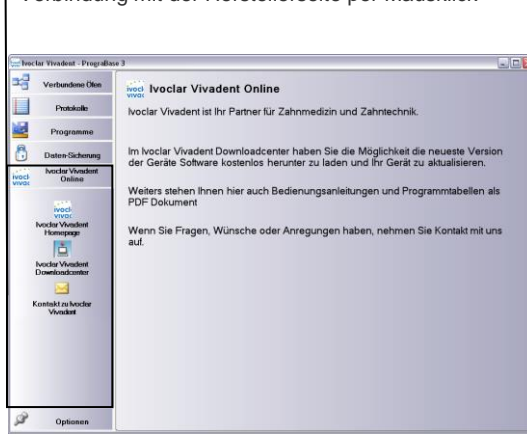

Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 FL-9494 Schaan
 Fürstentum Liechtenstein
 Tel. +423 / 235 3535
 Fax +423 / 235 33 60
 www.ivoclarvivadent.com

Serviceline:
 Tel. +423 / 235 36 36

