

Programat® CS

Programmtabelle °C / °F

Programat CS Programmtabelle													Werte in °C	
Gültig ab Software V2.00														
Wertebereiche für alle Programme	1 - 20	MIN	MAX	B	S	t†	T	H	V1	V2	L	tL	°C	[mm:ss]
				Bereitsch. temp. [°C]	Schliesszeit [mm:ss]	Temperaturanstieg [°C]	Haltemp. [°C]	Haltezeit [mm:ss]	Vakuum ein [°C]	Vakuum aus [°C]	Langzeit-abkühlung [°C]	Abkühlgradient [°C]	[°C]	[mm:ss]
				100	00:18	30	100	00:00	0	0	0	0	0	00:00
				700	30:00	140	1200	60:00	1200	1201	1200	50	700	60:00
Materialgruppe	P.Nr.													
IPS e.max CAD	1	Kristall./Glanz	m.V.	403	06:00	90 / 30	820 / 840	00:10/07:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0
IPS e.max CAD	2	Korrekturbrand	m.V.	403	06:00	90 / 30	820 / 840	00:10/03:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0
IPS e.max CAD	3	Speed-Kri/Spray	m.V.	403	01:30	90 / 30	820 / 840	00:10/07:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0
IPS Empress CAD	4	Malfarben/Glanz	o.V.	403	06:00	100	790	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD-on	5	Fügen/Kristall.	m.V.	403	02:00	30 / 30	820 / 840	2:00/7:00	550/820	820/840	600	0	403	06:00
IPS e.max CAD-on	6	Charakt./Glanz	m.V.	403	06:00	60 / 30	820 / 840	0:10/3:00	550/820	820/840	600	0	0	0
IPS e.max CAD	7	Impulse Kristall.	m.V.	403	06:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0
My Programs	8	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	9	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	10	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	11	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	12	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	13	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	14	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	15	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	16	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	17	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	18	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	19	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	20	Individuell	o.V.	403	00:18	30	410	00:01	0	0	0	0	0	0

P.Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7:

2-stufiges Programm

m.V. = mit Vakuum

o.V. = ohne Vakuum

Programat CS Programmtabelle													Werte in °F	
Gültig ab Software V2.00														
Wertebereiche für alle Programme	1 - 20	MIN	MAX	B	S	t†	T	H	V1	V2	L	tL	°F	[mm:ss]
				Bereitsch. temp. [°F]	Schliesszeit [mm:ss]	Temperaturanstieg [°F]	Haltemp. [°F]	Haltezeit [mm:ss]	Vakuum ein [°F]	Vakuum aus [°F]	Langzeit-abkühlung [°F]	Abkühlgradient [°F]	[°F]	[mm:ss]
				212	00:18	54	212	00:00	0	0	0	0	0	00:00
				1292	30:00	252	2192	60:00	2192	2194	2192	90	1292	60:00
Materialgruppe	P.Nr.													
IPS e.max CAD	1	Kristall./Glanz	m.V.	757	06:00	162 / 54	1508/1544	00:10/07:00	1022/1508	1508/1544	1292	0	0	0
IPS e.max CAD	2	Korrekturbrand	m.V.	757	06:00	162 / 54	1508/1544	00:10/03:00	1022/1508	1508/1544	1292	0	0	0
IPS e.max CAD	3	Speed-Kri/Spray	m.V.	757	01:30	162 / 54	1508/1544	00:10/07:00	1022/1508	1508/1544	1292	0	0	0
IPS Empress CAD	4	Malfarben/Glanz	o.V.	757	06:00	180	1454	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD-on	5	Fügen/Kristall.	m.V.	757	02:00	54 / 54	1508/1544	2:00/7:00	1022/1508	1508/1544	1112	0	757	06:00
IPS e.max CAD-on	6	Charakt./Glanz	m.V.	757	06:00	108 / 54	1508/1544	0:10/3:00	1022/1508	1508/1544	1112	0	0	0
IPS e.max CAD	7	Impulse Kristall.	m.V.	757	06:00	108 / 54	1418/1562	0:10/10:00	1022/1418	1418/1562	1292	0	0	0
My Programs	8	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	9	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	10	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	11	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	12	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	13	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	14	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	15	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	16	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	17	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	18	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	19	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0
My Programs	20	Individuell	o.V.	757	00:18	54	770	00:01	0	0	0	0	0	0

P.Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7:

2-stufiges Programm

m.V. = mit Vakuum

o.V. = ohne Vakuum

Version: 2
Ausgabedatum: 03/2011
Gültig ab Software V2.0

Druckort: Österreich
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
604553/0411/d

