

Programat EP 5000 & EP 5000/G2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V6.1 06.07.2011	Software optimiert Optimierte Programmauswahl für individuelle Pressprogrammen	Aktuell , ausgelieferte Version
V6.0 04.04.2011	Neue Software EP 5000/G2: Software optimiert und neue Features: Im Vergleich zum Vorgängermodell Programat EP 5000 wurden folgende Funktionen integriert: <ul style="list-style-type: none">- Power Saving Technology- TSP: Thermo Shock Protection- CSP: Cooling Shock Protection- Neue Programmstruktur (130 Ivoclar Vivadent Programme, 500 individuelle Programme- Neues Ivoclar Vivadent Programm für IPS e.max Press Multi Rohlinge- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS InLine One (Programme 121 – 126)- Neue Ivoclar Vivadent Programme für IPS e.max CAD-on (Programme 83 – 84)	Nicht mehr erhältlich!
V5.0 01.05.2010	Software optimiert Ivoclar Vivadent Brennparameter wurden geändert	Nicht mehr erhältlich!
V3.3 18.05.2009	Software optimiert <ul style="list-style-type: none">- Pressparameter für IPS e.max Press HT für IPS Muffelsystem 100g und 200g wurden integriert- IPF (Intelligent Press Function) Parameter für IPS e.max ZirPress (für IPS Muffelsystem 300g) und IPS Inline PoM (für IPS Muffelsystem 300g) wurden integriert	Nicht mehr erhältlich!

V3.2 12.12.2008	Software optimiert - Optimierte Einstellung des Crack Detection System (CDS) für 300 gr. Pressmuffel im Programm „IPS InLine PoM - 300g“	Nicht mehr erhältlich!
V3.1 14.10.2008	Neue Funktionen - Auswahloption für 300 gr. Pressmuffel wurde integriert - Parameter für die 300 gr. Pressmuffel wurden integriert	Nicht mehr erhältlich!
V3.00 15.11.2007	Software optimiert und neue Funktionen - Neues STD-Pressprogramm „InLine PoM“ - Esthetik-Pressprogramme neu mit 180 statt 250 Abbruchgeschwindigkeit - Aktualisierte Ivoclar Standard-Brennprogramme P1-P120 - Neu integrierte Sprachen: chinesisches simpl., chinesisches trad., schwedisch, russisch, polnisch, türkisch	Nicht mehr erhältlich!
V1.04 28.08.2007	Software optimiert und neue Funktionen Erweiterte USB Memory-Stick Erkennung	Nicht mehr erhältlich!
V1.03 04.06.2007	Software optimiert	Nicht mehr erhältlich!
V1.02 01.06.2007	Neue Funktion Verbesserte Öffnungs- und Schliessbewegung mit Sanftanlauffunktion	Nicht mehr erhältlich!
V1.01 22.05.2007	Neue Funktion Brennprogramm-Protokollierung mit SW-Informationen	Nicht mehr erhältlich!
V1.00 14.05.2007	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Stand: 06.07.2011