

Programat® – Tabla de programas cocción en °C

Ivoclar Vivadent Tabla de programas		Valores en °C		B	S	t†	T	H	V1	V2	L	IL	↺	↻
				Temperatura servicio [°C]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°C]	Mantenim. temperatura [°C]	Tiempo mantenim. [mm:ss]	Conexión vacío [°C]	Descon. vacío [°C]	Enfriamiento lento [°C]	Rampa de enfriamiento [°C]	[°C]	[mm:ss]
Rango de valores para todos los programas		min.	100	00:18	10 (30)	100	00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
		máx.	700	30:00	140	1200	60:00	1200	1201	1200	50	700	60:00	
Grupo de materiales	P.Nr.													
IPS Style	1	1½/2ª Cocción Opaquer 870	m.V.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	0	0	0	0
	2	1½/2ª Cocción Margín	m.V.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	0	0	0	0
	3	1ª Cocción Dent/Inc/Cocción One	m.V.	403	06:00	60	790	01:00	450	789	0	0	0	0
	4	2ª Cocción Dent/Inc/ One	m.V.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	0	0	0	0
	5	Cocción Maquillaje	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	0	0	0	0
	6	Cocción glaseado/AddOn y glaseado	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	0	0	0	0
	7	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0
	8	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	9	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	10	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS InLine	11	1½/2ª cocción powder opaquer	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	0	0	0	0
	12	1½/2ª Cocción opaquer	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	0	0	0	0
	13	1½/2ª Cocción Margín	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	0	0	0	0
	14	1ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	0	0	0	0
	15	2ª Cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	0	0	0	0
	16	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	0	0	0	0
	17	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0
	18	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	0	0	0	0
	19	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0
	20	Add-On 690°C pure	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0
IPS Empress Esthetic + CAD	21	1ª Cocción Wash	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	0	0	0	0
	22	1½/2ª Cocción Incisal/Transpa	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	0	0	0	0
	23	Cocción Maquillaje Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	0	0	0	0
	24	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	25	Cocción Glaseado Universal	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	0	0	0	0
	26	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	27	Add-On	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	0	0	0	0
	28	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	29	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	30	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press técnica maquillaje	31	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0
	32	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	33	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0
	34	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	35	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0
	36	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	37	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	38	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	39	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	40	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press técnica capas	41	Cocción capa de imprimación (base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	42	Caracteriz. cocción capa imprimación	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	43	1½/2ª cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	44	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0
	45	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	46	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0
	47	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	48	Add-On y Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0
	49	Add-On+cocción glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0
	50	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress técnica maquilla	51	ZirLiner antes de encerado+presión	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	0	0	0	0
	52	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	0	0	0
	53	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	54	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	0	0	0
	55	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	56	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	0	0	0
	57	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	58	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	59	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
	60	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress técnica capas	61	ZirLiner antes de encerado+presión	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	0	0	0	0
	62	Cocción capa de imprimación (base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	63	1½/2ª cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0
	64	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	65	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	66	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	67	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	68	Add-On y Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	69	Add-On+cocción glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	70	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	0	0	0
IPS e.max ZirCAD + Ceram	71	Cocción ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	0	0	0	0
	72	1½/2ª Cocción Margín	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	0	0	0	0
	73	Cocción Wash. 1½/2ª Dentina/Incisal	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	0	0	0	0
	74	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	75	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	76	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	77	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	78	Add-On y Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	0	0	0
	79	Add-On+cocción glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	450	0	0	0
	80	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	0	0	0

Versión: 7
Fecha de edición: 2017-07

Validez: a partir del Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1

Ivoclar Vivadent Tabla de programas		Valores en °C		B	S	t↑	T	H	V1	V2	L	tL	S	S
Rango de valores para todos los programas		min.		Temperatura servicio [°C]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°C]	Mantenim. temperatura [°C]	Tiempo mantenim. [mm:ss]	Conexión vacío [°C]	Descon. vacío [°C]	Enfriamiento lento [°C]	Rampa de enfriamiento [°C]	[°C]	[mm:ss]
		máx.		100	00:18	10 (30)	100	00:00	0	0	0	0	0	00:00
				700	30:00	140	1200	60:00	1200	1201	1200	50	700	60:00
Grupo de materiales	P.Nr.													
IPS e.max CAD Crystal/Glaze														
81	Cristaliz./Glaseado LT/MT/HT	m.V.	403	08:00	90 / 30	820 / 840	0:10/7:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
82	Cocción Correc./Maquillaje	m.V.	403	08:00	90 / 30	820 / 840	0:10/3:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
83	Fusión/Cocción cristal. CAD-on	m.V.	403	02:00	30 / 30	820 / 840	2:00/7:00	550 / 820	820 / 840	600	0	403	06:00	0
84	Cocción Corrección Maquillaje/ Glaseado CAD-on	m.V.	403	08:00	60 / 30	820 / 840	0:10/3:00	550 / 820	820 / 840	600	0	0	0	0
85	Speed-Cr./Spray*	m.V.	403	01:00	110 / 50	800 / 850	0:00/3:00	690 / 800	800 / 850	700	40	480	02:00	0
86	Cristalización MO/LT/MT/HT	m.V.	403	08:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0	0
87	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
88	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
89	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
90	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD técnica maquillaje														
91	Cristaliz./Glaseado LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	820 / 840	0:10/7:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
92	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0	0
93	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
94	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	0	0	0	0	0
95	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
96	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0	0
97	Cristalización MO/LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0	0
98	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
99	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
100	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD técnica de capas														
101	Cristalización Imp/MO/LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	770 / 850	0:10/10:00	550 / 770	770 / 850	700	0	0	0	0
102	Cristaliz./Glaseado LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	820 / 840	0:10/7:00	550 / 820	820 / 840	700	0	0	0	0
103	Cocción capa de imprimación (base)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0	0
104	1ª/2ª cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	0:00/2:00	400 / 650	650 / 729	0	0	0	0	0
105	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0	0
106	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
107	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	0	0	0	0	0
108	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
109	Adición después de glaseado	m.V.	403	08:00	50	700	01:00	450	699	0	0	0	0	0
110	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine PoM														
111	1ª/2ª cocción powder opaquer	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	0	0	0	0	0
112	1ª/2ª Cocción opaquer	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	0	0	0	0	0
113	Cocción Retoque	m.V.	403	04:00	60	840	01:00	450	839	0	0	0	0	0
114	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	0	0	0	0	0
115	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
116	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	800	02:00	450	799	0	0	0	0	0
117	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	0	0	0	0	0
118	Add-On después de Cocción Glas.	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0	0
119	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
120	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine One														
121	1ª/2ª cocción powder opaquer	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	0	0	0	0	0
122	1ª/2ª Cocción opaquer	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	0	0	0	0	0
123	1ª cocción Dentiscal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	0	0	0	0	0
124	2ª cocción Dentiscal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	0	0	0	0	0
125	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	0	0	0	0	0
126	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
127	Cocción Glaseado InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	0	0	0	0	0
128	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
129	Add-On después de Cocción Glas.	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	0	0	0	0	0
130	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS d.SIGN														
131	1ª cocción Wash Opaquer	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	0	0	0	0	0
132	2ª cocción Opaquer	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	0	0	0	0	0
133	1ª/2ª Cocción Margin	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	0	0	0	0	0
134	1ª/2ª cocción Dentin/Incisal	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	0	0	0	0	0
135	Cocción Maquillaje d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
136	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	0	0	0	0	0
137	Cocción Glaseado d.SIGN	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	0	0	0	0	0
138	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	800	01:00	450	799	0	0	0	0	0
139	Cocción mezcla Add-On 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	0	0	0	0	0
140	Add-On	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	0	0	0	0	0
ZirCAD técnica maquilla														
141	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	0	0	0	0
142	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	450	0	0	0	0
143	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
144	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
145	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
146	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
147	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
148	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
149	Individual	o.V.	403	00:18	30	700	01:00	0	0	0	0	0	0	0
150	Cocción de Regeneración	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	0	0	750	25	0	0	0

Información sobre los programas individuales se puede encontrar en el capítulo 5.3 de las correspondientes Instrucciones de Uso.

P.Nr. 41, 42, 43, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 97, 101, 102, 103, 104: Programa en 2 etapas

*Sólo en Programat P300, P500 y P700

m.V. = con vacío
o.V. = sin vacío

Versión: 7
Fecha de edición: 2017-07

Validez: a partir del Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1

Programat® – Tabla de programas cocción en °F

Ivoclar Vivadent Tabla de programas		Valores en °F		B	S	t†	T	H	V1	V2	L	TL	S		
				Temperatura servicio [°F]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°F]	Mantenim. temperatura [°F]	Tiempo mantenim. [mm:ss]	Conexión vacío [°F]	Descos. vacío [°F]	Enfriamiento lento [°F]	Rampa de enfriamiento [°F]	[°F]	[mm:ss]	
Rango de valores para todos los programas		MIN		212	00:18	18 (54)	212	00:00	0	0	0	0	0	0	00:00
		MAX		1292	30:00	252	2192	60:00	2192	2194	2192	90	1292	60:00	
Grupo de materiales	P.Nr.														
IPS Style	1	1 1/2° Cocción Opaquer 870	m.V.	757	04:00	180	1598	01:00	842	1596	0	0	0	0	0
	2	1 1/2° Cocción Margín	m.V.	757	06:00	108	1544	01:30	842	1542	0	0	0	0	0
	3	1° Cocción Dent/Inc/Cocción One	m.V.	757	06:00	108	1454	01:00	842	1452	0	0	0	0	0
	4	2° Cocción Dent/Inc/ One	m.V.	757	06:00	108	1436	01:00	842	1434	0	0	0	0	0
	5	Cocción Maquillaje	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
	6	Cocción glaseado/AddOn y glaseado	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
	7	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0	0
	8	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	9	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	10	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS InLine	11	1 1/2° cocción powder opaquer	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	0	0	0	0	0
	12	1 1/2° Cocción opaquer	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	0	0	0	0	0
	13	1 1/2° Cocción Margín	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	0	0	0	0	0
	14	1° Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	0	0	0	0	0
	15	2° Cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	0	0	0	0	0
	16	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	0	0	0	0	0
	17	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	18	Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	0	0	0	0	0
	19	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0	0
	20	Add-On 690°C pure	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0	0
IPS Empress Esthetic + CAD	21	1° Cocción Wash	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	0	0	0	0	0
	22	1 1/2° Cocción Incisal/Transpa	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	0	0	0	0	0
	23	Cocción Maquillaje Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	0	0	0	0	0
	24	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	25	Cocción Glaseado Universal	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	0	0	0	0	0
	26	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	27	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	0	0	0	0	0
	28	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	29	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	30	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press técnica maquillaje	31	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	32	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	33	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	34	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	35	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0	0
	36	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	37	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	38	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	39	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	40	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max Press técnica capas	41	Cocción capa de imprimación (base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	42	Caracteriz. cocción capa imprimación	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	43	1 1/2° cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	44	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	45	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	46	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	47	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	48	Add-On y Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0	0
	49	Add-On+cocción glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0	0
	50	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress técnica maquilla	51	ZirLiner antes de encerado+presión	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	0	0	0	0	0
	52	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0	0
	53	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	54	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	0	0	0	0
	55	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	56	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	0	0	0	0
	57	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	58	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	59	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
	60	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0	0
IPS e.max ZirPress técnica capas	61	ZirLiner antes de encerado+presión	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	0	0	0	0	0
	62	Cocción capa de imprimación (base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	63	1 1/2° cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0	0
	64	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	65	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	66	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	67	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	68	Add-On y Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	69	Add-On+cocción glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	70	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	0	0	0	0
IPS e.max ZirCAD + Ceram	71	Cocción ZirLiner	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	0	0	0	0	0
	72	1 1/2° Cocción Margín	m.V.	757	04:00	72	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0	0
	73	Cocción Wash. 1 1/2° Dentina/Incisal	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0	0
	74	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	75	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	76	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	77	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	78	Add-On y Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	0	0	0	0
	79	Add-On+cocción glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0	0
	80	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	0	0	0	0

Versión: 7
Fecha de edición: 2017-07

Validez: a partir del Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1

Ivoclar Vivadent Tabla de programas		Valores en °F		B	S	t↑	T	H	V1	V2	L	tL	S	S	
Rango de valores para todos los programas		MIN		212	00:18	18 (54)	212	00:00	0	0	0	0	0	00:00	
		MAX		1292	30:00	252	2192	60:00	2192	2194	2192	90	1292	60:00	
Grupo de materiales	P.Nr.			Temperatura servicio [°F]	Tiempo cierre [mm:ss]	Aumento temperatura [°F]	Mantenim. temperatura [°F]	Tiempo mantenim. [mm:ss]	Conexión vacío [°F]	Descon. vacío [°F]	Enfriamiento lento [°F]	Rampa de enfriamiento [°F]	[°F]	[mm:ss]	
IPS e.max CAD Crystal/Glaze		81	Cristaliz./Glaseado LT/MT/HT	m.V.	757	08:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0
		82	Cocción Correc./Maquillaje	m.V.	757	08:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/3:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0
		83	Fusión/Cocción cristal. CAD-on	m.V.	757	02:00	54 / 54	1508 / 1544	2:00/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1112	0	757	06:00
		84	Cocción Corrección Maquillaje/ Glaseado CAD-on	m.V.	757	08:00	108 / 54	1508 / 1544	0:10/3:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1112	0	0	0
		85	Speed-Cr./Spray*	m.V.	757	01:00	198 / 90	1472 / 1562	0:00/3:00	1274 / 1472	1472 / 1562	1292	72	896	02:00
		86	Cristalización MO/LT/MT/HT	m.V.	757	08:00	108 / 54	1418 / 1562	0:10/10:00	1022 / 1418	1418 / 1562	1292	0	0	0
		87	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		88	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		89	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		90	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD técnica maquillaje		91	Cristaliz./Glaseado LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0
		92	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0
		93	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0
		94	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	0	0	0	0
		95	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0
		96	Add-On tras Cocción Glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0
		97	Cristalización MO/LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1418 / 1562	0:10/10:00	1022 / 1418	1418 / 1562	1292	0	0	0
		98	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		99	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		100	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS e.max CAD técnica de capas		101	Cristalización Imp/MO/LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1418 / 1562	0:10/10:00	1022 / 1418	1418 / 1562	1292	0	0	0
		102	Cristaliz./Glaseado LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1508 / 1544	0:10/7:00	1022 / 1508	1508 / 1544	1292	0	0	0
		103	Cocción capa de imprimación (base)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0
		104	1ª/2ª cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	0:00/2:00	752 / 1202	1202 / 1344	0	0	0	0
		105	Cocción Maquillaje e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0
		106	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0
		107	Cocción Glaseado e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	0	0	0	0
		108	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0
		109	Add-On después de glaseado	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	0	0	0	0
		110	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS InLine PoM		111	1ª/2ª cocción powder opaquer	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	0	0	0	0
		112	1ª/2ª Cocción opaquer	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	0	0	0	0
		113	Cocción Retoque	m.V.	757	04:00	108	1544	01:00	842	1542	0	0	0	0
		114	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0
		115	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0
		116	Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1472	02:00	842	1470	0	0	0	0
		117	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	0	0	0	0
		118	Add-On después de Cocción Glas.	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0
		119	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		120	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS InLine One		121	1ª/2ª cocción powder opaquer	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	0	0	0	0
		122	1ª/2ª Cocción opaquer	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	0	0	0	0
		123	1ª cocción Dentiscal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	0	0	0	0
		124	2ª cocción Dentiscal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	0	0	0	0
		125	Cocción Maquillaje InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	0	0	0	0
		126	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0
		127	Cocción Glaseado InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	0	0	0	0
		128	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0
		129	Add-On después de Cocción Glas.	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	0	0	0	0
		130	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
IPS d.SIGN		131	1ª cocción Wash Opaquer	m.V.	757	06:00	144	1652	01:00	842	1650	0	0	0	0
		132	2ª cocción Opaquer	m.V.	757	06:00	144	1634	01:00	842	1632	0	0	0	0
		133	1ª/2ª Cocción Margin	m.V.	757	06:00	108	1634	01:00	842	1632	0	0	0	0
		134	1ª/2ª cocción Dentin/Incisal	m.V.	757	07:00	108	1598	01:00	842	1596	0	0	0	0
		135	Cocción Maquillaje d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0
		136	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0
		137	Cocción Glaseado d.SIGN	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	0	0	0	0
		138	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1472	01:00	842	1470	0	0	0	0
		139	Cocción mezcla Add-On 1:1	m.V.	757	04:00	108	1490	01:00	842	1488	0	0	0	0
		140	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1382	01:00	842	1380	0	0	0	0
ZirCAD técnica maquilla		141	Cocción Maquillaje Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0
		142	Cocción Glaseado Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	842	0	0	0
		143	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		144	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		145	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		146	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		147	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		148	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		149	Individual	o.V.	757	00:18	54	1292	01:00	0	0	0	0	0	0
		150	Cocción de Regeneración	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	0	0	1382	45	0	0

Información sobre los programas individuales se puede encontrar en el capítulo 5.3 de las correspondientes Instrucciones de Uso.

P.Nr. 41, 42, 43, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 97, 101, 102, 103, 104: Programa en 2 etapas

*Sólo en Programat P300, P500 y P700

m.V. = con vacío
o.V. = sin vacío

Versión: 7
Fecha de edición: 2017-07

Validez: a partir del Software:
P300/G2: V8.1, P500/G2: V8.1,
P700/G2: V8.1, EP 3000/G2: V8.1,
EP 5000/G2: V8.1