

Heliosit® Orthodontic

Material de cementación para brackets



ALTAMENTE TRANSPARENTE Y ESTABLE

Heliosit® Orthodontic

Y bluephase®

El perfecto equipo para la rápida cementación de brackets de metal o cerámica.

Ventajas

Heliosit® Orthodontic

- Fotopolimerizable
- Altamente Transparente
- Estable, consistencia adecuada



bluephase®

- Inalámbrica
- LED de alto rendimiento (1.100 mW/cm²)
- Corto tiempo de fraguado especialmente idóneo para cementación de brackets.



Aplicación

- Limpiar la superficie de esmalte
- Aislamiento con rollos de algodón
- Grabado de la superficie de esmalte con ácido fosfórico
- Lavar y secar
- Aplicar Heliosit Orthodontic
- Posicionar el bracket en la superficie del diente
- Fotopolimerizar



Datos Técnicos

- Resistencia a la flexión: 80 MPa
- Fuerza de adhesión del bracket
A esmalte grabado:
Cerámica: 10 MPa, metal: 12 MPa

Presentación

Heliosit Orthodontic
Refill
3 Jer, 2,5 g c/u



El material se ha fabricado para su uso en el ramo Dental y debe utilizarse según instrucciones de uso. Datos y descripciones no constituyen una garantía de las propiedades y por lo tanto no son vinculantes. Impreso en Liechtenstein.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
590492/0504/3/sp/BVD

Ivoclar Vivadent S.L.U.
c/ Emilio Muñoz Nº 15
Entrada c/ Albarracín
E-28037 Madrid
Spain
Tel. + 34 91 375 78 20
Fax + 34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 7-B-83,
Of. 520
Santafé de Bogotá
Colombia
Tel +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63

Ivoclar-Vivadent S.A. de C.V.
Av. Mazatlán No. 61, Piso 2
Col. Condesa
06170 México, D.F.
Mexico
Tel. +52 (55) 5062-1000
Fax +52 (55) 5062-1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent®