

Vivaglass® CEM PL

SELBSTHÄRTENDER GLASIONOMER-ZEMENT MIT HOHER TRANSPARENZ



Vivaglass® CEM PL
Liquid

Befestigungszement
auf Glasionomerbasis
Glasionomer-based
luting cement

ivoclar
vivadent®

ivoclar
vivadent®
clinical

ANWENDERFREUNDLICH

Vivaglass CEM PL* ist ein selbsthärtender Glasionomerzement, bei dem Pulver und Flüssigkeit optimal aufeinander abgestimmt sind. Die gute Benetzung beider Komponenten und das einfache Mischungsverhältnis – 1 Tropfen + 1 Löffel für 1 Krone – ermöglichen ein Anmischen in kürzester Zeit.

*) PL = Powder/Liquid



PATENTIERTER TROPFMECHANISMUS

Die Entnahme der Flüssigkeit aus der innovativen Tubenapplikation gelingt aufgrund des speziellen, patentierten Tropfmechanismus einfach und reproduzierbar. So ist eine gleichbleibende Qualität möglich.

EIGENSCHAFTEN


- ⊕ Hohe Transparenz
- ⊕ Gute Haftwerte am Dentin
- ⊕ Einfaches Anmischen/
Gute Benetzung
- ⊕ Geringe Löslichkeit
- ⊕ Kontinuierliche Fluorid-
freisetzung
- ⊕ Röntgensichtbarkeit
- ⊕ Gute Fliesseigenschaften
- ⊕ Geringe Filmdicke
- ⊕ Hohe Druckfestigkeit
- ⊕ Farbe Universal
(weisslich-gelb)



INDIKATIONEN

Zur Befestigung von:


- ⊕ Inlays, Onlays, Kronen, Brücken aus Metall, Metallkeramik oder Metall mit Kunststoff-Verblendung in allen Fällen, in denen eine ausreichende mechanische Retention gegeben ist
- ⊕ Vollkeramischen Kronen und Brückenversorgungen aus hochfester Keramik (z.B. IPS Empress 2, Aluminiumoxidkeramik, Zirkonoxidkeramik)
- ⊕ Metall-Wurzelstiften, bzw. indirekten Metallstift-Stumpfaufbauten
- ⊕ orthodontischen Bändern
- ⊕ konfektionierten Stahlkronen

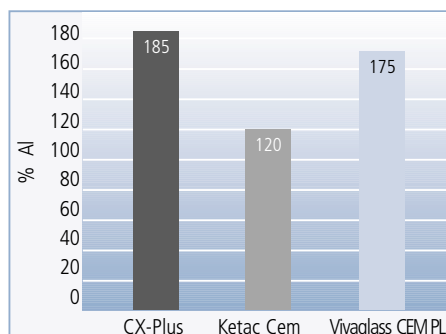

Röntgensichtbarkeit


Die Röntgensichtbarkeit von Vivaglass CEM PL ist vergleichbar mit den aufgeführten Mitbewerberprodukten. Das Material ist auf Röntgenbildern leicht identifizierbar.

Interne Untersuchung,
F&E Ivoclar Vivadent, Schaan.
CX-Plus ist eine registrierte Marke der Firma Shofu, Ketac Cem ist eine registrierte Marke der Firma 3M/ESPE.

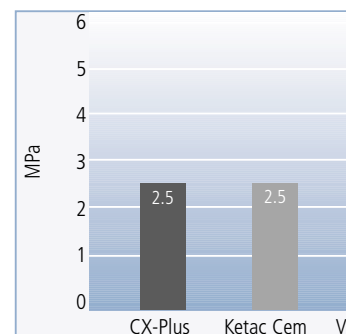

ÄSTHETISCH

Vivaglass CEM ist nicht nur als Pulver-Flüssigkeits-Handmischvariante (PL) mit der innovativen Dosiertube erhältlich, sondern auch in einer vordosierten Mischkapsel als Vivaglass CEM IC (=Injection Capsule).

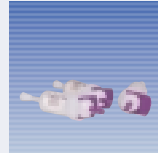

Die Ivoclar Vivadent-Mischkapsel ist kompatibel mit allen gängigen Mischern und Applikatoren.

VERARBEITUNG

Pulver und Flüssigkeit im Verhältnis 1:1 anmischen, zementieren, fertig!

- ✦ Kein Ätzen, kein Bonden, kein Kofferdamm
- ✦ Chemisch härtend
- ✦ Hohe Haftkraft an Metall, Keramik und Dentin

ANWENDUNGSGEBIETE

- ✦ Verstärkte Vollkeramik, wie z.B. IPS Empress 2, Zirkonoxid- oder Aluminiumoxidkeramiken
- ✦ Metallkeramik, wie z.B. IPS Classic oder IPS d.SIGN



TRANSPARENZ

Die im Vergleich zu Mitbewerberprodukten hohe Transparenz von Vivaglass CEM PL ermöglicht ästhetische Ergebnisse bei der Befestigung von Restaurationen aus verstärkter Vollkeramik oder freiliegenden Keramikschnitten.

Vivaglass CEM PL

Ketac-Cem

CX-Plus




CX-Plus ist eine registrierte Marke der Firma Shofu, Ketac Cem ist eine registrierte Marke der Firma 3M/ESPE.

Haftung an Dentin

Vivaglass CEM PL zeigt im Vergleich zu den aufgeführten Mitbewerberprodukten höhere Dentinhaftwerte im Scherhaftwertversuch.


Interne Untersuchung, F&E Ivoclar Vivadent, Schaan. CX-Plus ist eine registrierte Marke der Firma Shofu, Ketac Cem ist eine registrierte Marke der Firma 3M/ESPE.

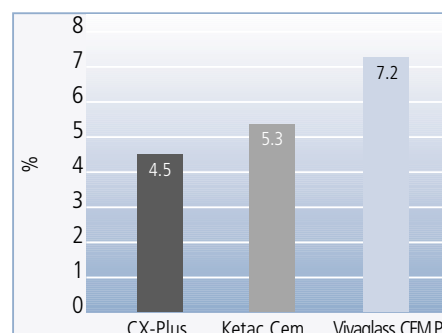

Transparenz

Die hohe Transparenz in Kombination mit dem hellen Farbton des Zements ist überall dort von Vorteil, wo ästhetische Ergebnisse erzielt werden sollen.

Interne Untersuchung, F&E Ivoclar Vivadent, Schaan. CX-Plus ist eine registrierte Marke der Firma Shofu, Ketac Cem ist eine registrierte Marke der Firma 3M/ESPE.

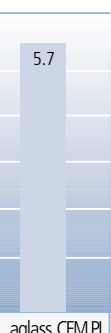

DIE INNOVATIVEN VERPACKUNGEN

LIEFERFORMEN

MISCHKAPSELN

Refill

- 25 Mischkapseln
- Vivaglass CEM IC 1 g
- Farbe Universal



Applikator für Mischkapseln



HANDMISCHVARIANTE

Assortment

- 1 Tube Vivaglass CEM PL
Liquid 10 ml
- 1 Flasche Vivaglass CEM PL
Pulver 30 g
- 1 Dosierlöffel
- 1 Mischblock



Refill Liquid

- 1 Tube Vivaglass CEM PL
Liquid 10 ml



Refill Powder

- 1 Flasche Vivaglass CEM PL
Pulver 30 g



Darstellungen und Angaben enthalten keine
Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht
bindend.

Gedruckt in Österreich
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
573130/0303/5/d/VVA

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
clinical