

# Eine für alle

IPS Ivocolor®

Universelle Malfarben  
und Glasuren



# Ein Sortiment, lebendige Vielfalt

IPS Ivocolor®


## Ob Press-, CAD- oder Schichtkeramiken

Mit IPS Ivocolor® geben Sie Ihren Restaurationen einen ganz besonderen Charakter. Individuell und effizient.

Mit diesem Sortiment aus universellen Malfarben und Glasuren schaffen Sie vielfältige und natürlich wirkende<sup>[1]</sup> Restaurationen. IPS Ivocolor eignet sich für alle keramischen Werkstoffe von Ivoclar<sup>[2]</sup>.

IPS Ivocolor bietet für jede Technik die passende Lösung, ob für die oberflächliche Bemalung von Restaurationen, das Abtönen von Schichtmassen, die farbliche Charakterisierung in der Schichttechnik, die individuelle Einfärbung der Gingiva oder die Individualisierung von Cut-Backs.

- ✓ Für ausdrucksstarke Restaurationen aus Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat, Voll- oder Metallkeramik<sup>[2]</sup>
- ✓ Geeignet für hoch- und niedrigschmelzende Keramiken<sup>[2]</sup> von Ivoclar mit WAK-Werten zwischen  $9,5$  und  $16,6 \times 10^{-6}/K$ <sup>[3]</sup>
- ✓ Hochglanz schon bei einer Brenntemperatur von  $710\text{ °C}$
- ✓ Erhöhte Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch Single-Source-Konzept für alle Anwendungen

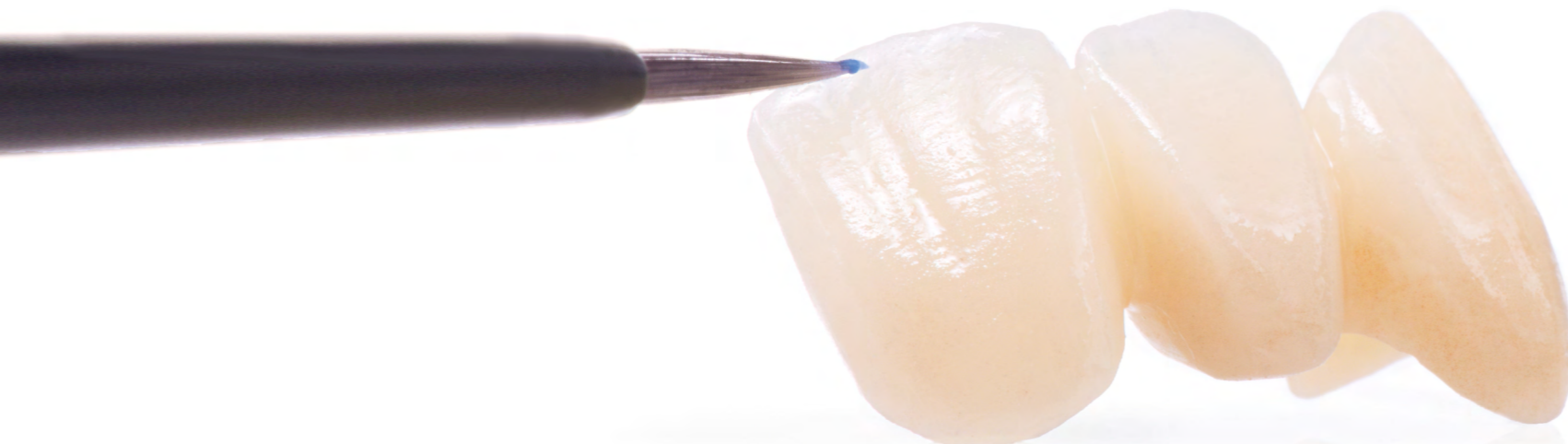

Vielfältig

Individuelle Freiheit bei der Charakterisierung dank ausgewählter Farbkombinationen und -kombinationen



Einfach

Vereinfachtes Handling dank innovativer Pastenrezeptur



Farbecht

Unverfälschte Glanzergebnisse, keine Grau- oder Weissverfärbung

## IPS Ivocolor – das verbindende Element

Vollkeramik	IPS Ivocolor	Metallkeramik
Glaskeramik IPS e.max Press IPS e.max CAD		
Zirkonoxid IPS e.max ZirCAD	<b>IPS Ivocolor Shades</b> <b>IPS Ivocolor Essences</b> <b>IPS Ivocolor Glazes</b>	Metall- unterstützende Verblendkeramik IPS Style Ceram IPS InLine
Metallfreie Verblendkeramik IPS e.max Ceram		

IPS Ivocolor Malfarben und Glasuren können auf Vollkeramik, wie z. B. auf IPS e.max ZirCAD, IPS e.max Press, IPS e.max CAD<sup>[2]</sup> oder unserer metallfreien Verblendkeramik, sowie auf der metallunterstützten Verblendkeramik verwendet werden. Daher sind sie auch in unseren ausgereiften Workflow-Lösungen zu finden.

[1] Unter natürlichen Lichtverhältnissen. LED-generiertes UV- oder UV-nahes Licht kann einen abweichenden Eindruck hervorrufen.

[2] Mit Ausnahme von unkristallisierten IPS e.max CAD-Restaurationen

[3] acc. ISO 6872:2015

# Eine Frage der Farbe

## IPS Ivocolor® Shade

### Schnell, einfach und brillant

Abgestimmt auf die A-D-Farben lassen sich keramische Restaurationen mit IPS Ivocolor Shade-Pasten farblich anpassen.

Dank unserer bewährten Gelstruktur bieten sie eine einfache Applikation und einen homogenen Farbauftrag. Besonders geeignet sind sie für die Bemalung monolithischer Restaurationen.



Farbeffekte bei der Schichttechnik

### Eigenschaften

- ✓ Hohe Effizienz bei der Farbgebung durch neun ideal abgestimmte IPS Ivocolor Shade Dentin-Farben
- ✓ Für natürlich wirkende Schneideanteile durch drei IPS Ivocolor Shade Incisals
- ✓ Fluoreszenz variiert in Abhängigkeit von der Farbe

IPS Ivocolor Shade Incisals für den Schmelzbereich



Gestalten Sie mit IPS Ivocolor Mamelons, Halos oder Schmelzrisse und erreichen Sie natürliche Tiefenwirkung und inzisale Transluzenz für die gewünschte Individualität.



Farbliche Abtönung mit IPS Ivocolor Shade Dentin-Farben

# Eine Farbe, viele Facetten

IPS Ivocolor® Essence

## Getönt, akzentuiert, effektiv

23 ausgewählte Ivocolor Essence-Pulver bieten für jede Anforderung die passenden Farben. So ergibt sich eine beeindruckende Farbvielfalt für die individuelle Bemalung von Restaurationen.

Zur Individualisierung von Schichtmassen werden die Pulver in Dentin-, Schmelz- oder Transpamassen eingemischt oder in eine ungebrannte Keramikschichtung einlasiert.

Natürlich können die IPS Ivocolor Essence-Pulver auch angemischt zur oberflächlichen Bemalung und zur Charakterisierung genutzt werden.

---

## Farbenpracht in jeglicher Form

- ✓ Fein gemahlene Gläser für homogene Malfarben
- ✓ Vielfältige Verarbeitungsoptionen dank Pulverform
- ✓ Spezielles Essence-Fluid für pastöse Konsistenz
- ✓ Fluoreszenz variiert in Abhängigkeit von der Farbe

# Für brillante Charaktere

## IPS Ivocolor® Glaze

### Klar, hochglänzend, farbecht

IPS Ivocolor Glaze ist der Glasur-Standard für farblich unverfälschte Brennergebnisse: eine bewährte, thixotrope Glasurpaste für einen hohen Glanzgrad mit nur einem Brand.



Individuelle Bemalung



Farbeffekte bei der Schichttechnik



«Für mich hat IPS Ivocolor zwei Vorteile. Erstens ist es universell und kann auf jedem Keramikmaterial von Ivoclar verwendet werden. Und zweitens ist es niedrigschmelzend, was bedeutet, dass alle Pigmente der keramischen Materialien, die zuvor aufgetragen wurden, genauso erhalten bleiben, wie sie appliziert wurden.»

August Bruguera, Spanien

### Glanzlichter

- ✓ Hochglanz mit nur einem Brand
- ✓ Einheitlicher Glanz, unabhängig vom keramischen Untergrund (z.B. Cut-Back)
- ✓ Keine Grau- oder Weissverfärbung
- ✓ Glasuren mit und ohne Fluoreszenz-Effekt
- ✓ Erhältlich als Pulver und als Paste

Mit IPS Ivocolor Powder FLUO oder IPS Ivocolor Paste FLUO glasierte Restaurationen erlangen einen fluoreszierenden Effekt unter UV-Licht.



# Auf Hochglanz gebrannt

## IPS Ivocolor® und Programat®-Brennöfen

### Modern, intuitiv, smart

Das sind die Programat G2-Brennöfen von Ivoclar. Mit bewährter Infrarot-Technologie<sup>[4]</sup>, patentiertem Zahnfarbassistenten DSA<sup>[5]</sup> und IoT-Funktionen – für glänzende Brennergebnisse.

Die optimierte Brenngutablageplatte bietet mehr Ablagefläche und eine verbesserte Kühlung. Die neueste Generation unserer Brennöfen verbindet modernes Design mit hoher Prozesssicherheit.

### Smarte Spezialisten

- ✓ Digitale Feststellung der Zahnfarbe
- ✓ Komfortable Programmauswahl dank hinterlegter IPS Ivocolor-Brennprogramme
- ✓ Eine Brenntemperatur für den Malfarben- und Glasurbrand in Mal- und Cut-Back-Technik
- ✓ Gleichbleibende Brennergebnisse dank exakter Temperaturführung und homogener Temperaturverteilung

## Lieferformen

### Kits



#### 740321 IPS Ivocolor Intro Kit

- 1x IPS Ivocolor Essence E01 white, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E04 sunset, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E10 mahogany, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD2, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Incisal SI1, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Glaze Powder, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife, 15 ml

#### 667649 IPS Ivocolor Starter Kit

- 1x IPS Ivocolor Essence E01 white, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E02 creme, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E10 mahogany, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E17 anthracite, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E21 basic red, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD1, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD2, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD4, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Incisal SI1, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Glaze Powder, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Glaze Paste, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround, 15 ml
- 1x IPS Ivocolor Essence Fluid, 15 ml
- 1x IPS Ivocolor Shade Guide Essence
- 1x IPS Ivocolor Shade Guide Dentin/Incisal

#### 667650 IPS Ivocolor Essence Kit

- 1x IPS Ivocolor Essence E01 white, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E02 creme, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E03 lemon, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E04 sunset, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E05 copper, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E06 hazel, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E07 olive, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E08 khaki, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E09 terracotta, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E10 mahogany, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E11 cappuccino, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E12 espresso, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E13 terra, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E14 profundo, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E15 ocean, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E16 sapphire, 1,8 g
- 1x IPS Ivocolor Essence E17 anthracite, 1,8 g

#### 667651 IPS Ivocolor Shade Kit

- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD0, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD1, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD2, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD3, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD4, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD5, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD6, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD7, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Dentin SD8, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Incisal SI1, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Incisal SI2, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Shade Incisal SI3, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Glaze Paste, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO, 3 g
- 1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround, 15 ml
- 1x IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife, 15 ml
- 1x IPS Ivocolor Shade Guide Dentin/Incisal

### Refills



#### IPS Ivocolor Essence

- 667652 IPS Ivocolor Essence E01 white, 1,8 g
- 667653 IPS Ivocolor Essence E02 creme, 1,8 g
- 667654 IPS Ivocolor Essence E03 lemon, 1,8 g
- 667655 IPS Ivocolor Essence E04 sunset, 1,8 g
- 667656 IPS Ivocolor Essence E05 copper, 1,8 g
- 667657 IPS Ivocolor Essence E06 hazel, 1,8 g
- 667658 IPS Ivocolor Essence E07 olive, 1,8 g
- 667659 IPS Ivocolor Essence E08 khaki, 1,8 g
- 667660 IPS Ivocolor Essence E09 terracotta, 1,8 g
- 667661 IPS Ivocolor Essence E10 mahogany, 1,8 g
- 667662 IPS Ivocolor Essence E11 cappuccino, 1,8 g
- 667663 IPS Ivocolor Essence E12 espresso, 1,8 g
- 667664 IPS Ivocolor Essence E13 terra, 1,8 g
- 667665 IPS Ivocolor Essence E14 profundo, 1,8 g
- 667666 IPS Ivocolor Essence E15 ocean, 1,8 g
- 667667 IPS Ivocolor Essence E16 sapphire, 1,8 g
- 667668 IPS Ivocolor Essence E17 anthracite, 1,8 g
- 667669 IPS Ivocolor Essence E18 black, 1,8 g
- 667670 IPS Ivocolor Essence E19 rose, 1,8 g
- 667671 IPS Ivocolor Essence E20 coral, 1,8 g
- 667672 IPS Ivocolor Essence E21 basic red, 1,8 g
- 667673 IPS Ivocolor Essence E22 basic yellow, 1,8 g
- 667674 IPS Ivocolor Essence E23 basic blue, 1,8 g

#### IPS Ivocolor Shade

- 667675 IPS Ivocolor Shade Dentin SD0, 3 g
- 667676 IPS Ivocolor Shade Dentin SD1, 3 g
- 667677 IPS Ivocolor Shade Dentin SD2, 3 g
- 667678 IPS Ivocolor Shade Dentin SD3, 3 g
- 667679 IPS Ivocolor Shade Dentin SD4, 3 g
- 667680 IPS Ivocolor Shade Dentin SD5, 3 g
- 667681 IPS Ivocolor Shade Dentin SD6, 3 g
- 667682 IPS Ivocolor Shade Dentin SD7, 3 g
- 667683 IPS Ivocolor Shade Dentin SD8, 3 g
- 667684 IPS Ivocolor Shade Incisal SI1, 3 g
- 667685 IPS Ivocolor Shade Incisal SI2, 3 g
- 667686 IPS Ivocolor Shade Incisal SI3, 3 g

#### IPS Ivocolor Glaze

- 667686 IPS Ivocolor Glaze Powder, 1,8 g
- 667687 IPS Ivocolor Glaze Powder, 5 g
- 667688 IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO, 1,8 g
- 667689 IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO, 5 g
- 667690 IPS Ivocolor Glaze Paste, 3 g
- 667691 IPS Ivocolor Glaze Paste, 9 g
- 667692 IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO, 3 g
- 667693 IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO, 9 g

#### IPS Ivocolor Mixing Liquids

- 667694 IPS Ivocolor Mixing Liquid allround, 15 ml
- 667695 IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife, 15 ml


#### IPS Ivocolor Essence Fluid

- 667696 IPS Ivocolor Essence Fluid, 15 ml

#### IPS Ivocolor Massenfarbschlüssel

- 668544 IPS Ivocolor Shade Guide Dentin/Incisal
- 668575 IPS Ivocolor Shade Guide Essence

[4] enthalten im Programat P710 G2 und Programat P510 G2  
 [5] enthalten im Programat P710 G2

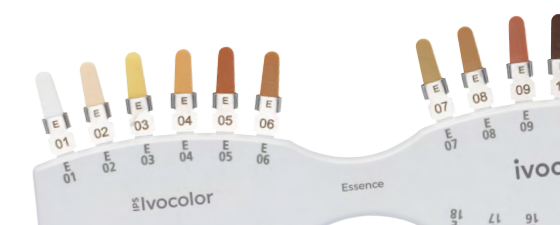

IPS Ivocolor® fügt sich beim Finalisieren nahtlos in verschiedene Workflows, wie z.B. den Zirkonoxid-Workflow, ein.



## Auswählen

IPS e.max® ZirCAD Prime bietet zwei unterschiedliche Zirkonoxid-Scheiben mit GT Technology für höchste Qualität und beeindruckende Ergebnisse.



## Fertigen

PrograMill® PM7 ist eine kraftvolle Fräsmaschine, die eine umfangreiche Datenbasis, Materialkompetenz und Software für hochpräzise Prothesen kombiniert.



## Sintern

Der Programat® S2 mit integriertem Speed-Sinterprogramm für IPS e.max ZirCAD ist unser kompakter und leichter Sinterofen für passgenaue Ergebnisse.



## Verblenden

IPS e.max® Ceram sind höchstästhetische Schichtmassen mit optimaler Modellierbarkeit und einfachem Handling für die Verblendung aller IPS e.max-Gerüste.



## Finalisieren

IPS Ivocolor® ist ein universelles Malfarben- und Glasursortiment für Restaurationen von hoher Qualität und Ästhetik.



## Brennen

Der Programat® P710 G2 ist der smarte Spezialist für hohe Brennqualität, bereits ab niedrigen Brenntemperaturen von 710 °C.



## Befestigen

ZirCAD® Cement für die konventionelle Befestigung, zeichnet sich durch einfaches Handling und eine schnelle und einfache Überschussentfernung aus.