



Syntac®


1 Total Etch

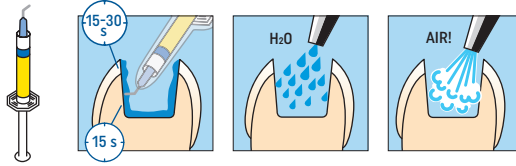


2 Syntac Primer

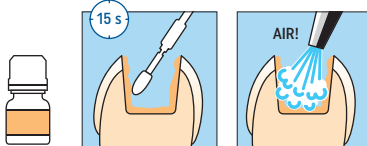


3 Syntac Adhesive

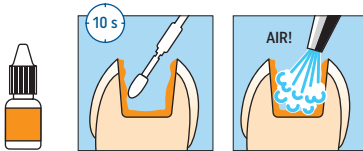

4 Heliobond

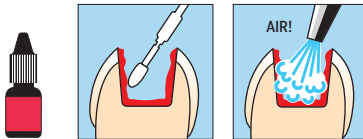

Bluephase®
Style

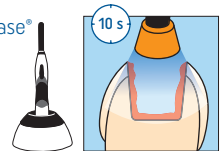

**Direct /
Direkt**

Light intensity
500 – 1,300 mW/cm²

Exposure time
10 s

**Indirekt* /
Indirekt***



***Indirekt Restorations:** When cementing lab-fabricated inlays, crowns or veneers with low-viscosity, light- or dual-curing luting composites, Heliobond should not be light-cured separately.

***Indirekte Füllungstherapie:** Bei der Befestigung von laborgefertigten Inlays, Kronen oder Veneers mit dünnfließenden, licht- oder dualhärtenden Befestigungscomposites sollte Heliobond nicht separat lichtgehärtet werden.